

CARICABATTERIE LUCAS™2

Istruzioni d'uso

Il caricabatterie LUCAS™2 (identificato anche come Caricatore) è un accessorio per il sistema di compressione toracica LUCAS™2. E' un'unità a sé stante progettata per ricaricare la Batteria del LUCAS™2 (identificata anche come Batteria).

IT

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ




Il Caricabatterie LUCAS™2 è conforme ai requisiti delle seguenti Direttive Europee:
Direttiva Bassa Tensione 2006/95/EC (LVD)
Direttiva 2004/108/CE EMC



CE 0434

Questo dispositivo è contrassegnato con il marchio CE:

© Copyright JOLIFE AB 2009. Tutti i diritti riservati.
LUCAS™ è un marchio registrato di JOLIFE AB.

LEGGERE LE ISTRUZIONI PRIMA DI USARE IL CARICABATTERIE LUCAS™2:

	Attenzione - leggere le istruzioni per l'uso Tutti gli operatori devono leggere attentamente le istruzioni per l'Uso prima di usare il Carica Batteria LUCAS™2.
	Il Carica Batteria LUCAS™2 deve essere usato solo con prodotti JOLIFE. La presa di corrente dovrebbe essere facilmente accessibile. Qualora si verificasse un errore operativo, la spina dovrebbe essere tolta immediatamente dalla presa.
	Il Carica Batterie LUCAS™2 è destinato all'uso in interni e non dovrebbe essere esposto all'acqua o alla polvere.
	Il Caricabatterie LUCAS™2 ha funziona ad un voltaggio pericoloso, si raccomanda di non rimuovere la copertura. Si raccomanda inoltre di fare eseguire qualsiasi intervento di riparazione o manutenzione necessario da personale qualificato, che può richiedere il supporto diretto del produttore.
	ATTENZIONE Il Caricabatterie LUCAS™2 è dotato di fusibili interni che si possono bruciare quando si verifica un'avaria del caricatore. Tali guasti devono essere riparati da personale qualificato.
	Controllare che il cavo di alimentazione non sia danneggiato. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, il Caricabatterie LUCAS™2 non deve essere usato.
	Non coprire il Carica Batteria LUCAS™2 mentre è in uso. Il Carica Batteria LUCAS™2 si accende collegandolo alla presa di corrente. Scollegarlo dalla presa di corrente per spegnerlo.

	I dispositivi elettrici ed elettronici non dovrebbero essere smaltiti insieme ai rifiuti ordinari, ma usando appositi contenitori per la raccolta ed il trattamento differenziati, il riciclo e lo smaltimento nel rispetto dell'ambiente.
	L'anno di Produzione è stampato sull'etichetta accanto a questo simbolo.

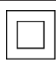



PREPARAZIONE AL PRIMO UTILIZZO

Collegare il cavo di alimentazione del Caricatore alla presa di corrente.

ISTRUZIONI PER LA CARICA

- Inserire la Batteria LUCAS™2 nel Caricatore.
- Collegare il cavo alla presa di corrente. Il LED (Light-Emitting Diode) sulla parte superiore del Caricatore ne mostra lo stato:
 - Rosso – In carica
 - Giallo – In carica (completato all' 80-95%)
 - Verde – Completamente carico / standby
- Quando la Batteria è completamente carica (il LED è verde):
 - Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa.
 - Rimuovere la Batteria dal Caricatore

SPECIFICHE TECNICHE:

Tipo	Caricabatterie per Batterie agli Ioni di litio		
Numero di celle	7		
Alimentazione in ingresso	90-264 VAC, 47-63 Hz, max 0.9A		
Intervallo di temperature per il funzionamento	-20 °C – +40 °C		
Intervallo di temperature per la conservazione	-25 °C – +85 °C		
Classe di isolamento elettrico	II		
Colore del LED: Rosso	In carica	Livello Carica Batteria LUCAS™2: 	1.2 A , 29.4 V
Colore del LED: Giallo	In carica (completato all' 80-95%)	Livello Carica Batteria LUCAS™2: 	29.4 V , < 0.5 A
Colore del LED: Verde	Pronto / standby	Livello Carica Batteria LUCAS™2: 	

Per ulteriori informazioni - contattare il costruttore Jolife AB

JOLIFE AB, Scheelevägen 17, SE-223 70 Lund, Svezia Tel: +46 (0) 46 286 50 00, Fax: +46 (0) 46 286 50 10, Email: info@jolife.com
jolife.com

LUCAS è un marchio registrato di JOLIFE AB.
CE 0434 © 2009 JOLIFE AB