

חלק ראשון: מקם את לוח גב בצורה נכונה

1. אשר דום לב
2. תתחיל בפעולת החייאת לב-ריאה ידנית (CPR) מיד.
3. פתח תיק; לחץ הפעל/כבה שניה 1 כדי להתחיל בדיקה עצמית ולהפעיל את המכשיר LUCAS
4. הסר את לוח גב מהתיק
5. תגיד "תפסיק החייאה ידנית" למציל אחר
6. תמקם לוח גב מתחת למטופל, ישירות מתחת בתי שחי של המטופל
7. תגיד "תחדש החייאה ידנית" למציל אחר

חלק שני: התקנה והעברה של החלק העליון לדחיסות LUCAS

8. הרם את החלק העליון של המכשיר LUCAS מהתיק ותמשוך פעם אחת על טבעות שחרור כדי לבדוק כי מנעולי הצבת פתוחים, ולאחר מכן תשחרר אצבעות מהטבעות.

מדריך מוכן ומפעיל טיימר כאשר דחיסה ידנית נפסקת.

9. חבר את החלק העליון ללוח גב, החל מהצד הקרוב ביותר למשתמש. הקשב לנקישה.
10. משוך כלפי מעלה פעם אחת על מנת לוודא הצמדה
11. הצב את טבעת היניקה מיד מעל קצה עצם החזה במרכז החזה. כוונן לפי הצורך
12. תדחוף את טבעת היניקה למטה באמצעות שתי אצבעות (מצב התאמה) עד שהוא נוגע בחזה של המטופל
13. לחץ על השהייה כדי לנעול מצב התחלתי
14. לחץ על הפעלה (30:2) או (ברצף)

מדריך עוצר טיימר: _____ שניות (המטרה: פחות מ-20 שניות)

חלק שלישי: התקן רצועת ייצוב

15. תרחיב באופן מלא את רצועת הייצוב באבזמים
16. מקם כרית תמיכה תחת צוואר המטופל
17. חבר אבזמים של רצועות כרית תמיכה לרצועות המכשיר
18. הדק רצועות כרית תמיכה חזק
19. בדוק באופן חזותי את המיקום הנכון של טבעת היניקה, התאם במידת הצורך