

Instruire practică

Sistem de compresie toracică LUCAS® 3

Prima parte: Amplasați corect placa dorsală

1. Confirmați stopul cardiac ☐
2. Începeți imediat RCP manual ☐
3. Deschideți carcasa; apăsați tasta PORNIRE/OPRIRE timp de 1 secundă pentru a porni testarea automată și a alimenta dispozitivul LUCAS ☐
4. Scoateți placa dorsală din carcasă ☐
5. Informați personalul medical să oprească resuscitarea cardiopulmonară manual ☐
6. Amplasați placa dorsală sub pacient, imediat sub axile ☐
7. Informați personalul medical să reia resuscitarea cardiopulmonară manuală ☐

Partea a doua: Fixarea părții superioare și trecerea la compresiile LUCAS

8. Ridicați partea superioară a dispozitivului LUCAS din carcasă și trageți o dată inelele de deblocare pentru a verifica dacă clemele de fixare sunt deschise, apoi dați drumul inelelor. ☐

Instructorul este pregătit și pornește cronometrul atunci când compresiile manuale se opresc.

9. Conectați partea superioară la placa dorsală, începând de pe partea cea mai apropiată de utilizator. Fixarea este însoțită de un clic. ☐
10. Trageți în sus o dată pentru a asigura fixarea ☐
11. Amplasați ventuza imediat deasupra capului sternului, în centrul pieptului. Reglați dacă este necesar. ☐
12. Împingeți ventuza în jos cu două degete (modul REGLARE) până când atinge toracele pacientului ☐
13. Apăsați tasta PAUZĂ pentru a bloca poziția de pornire ☐
14. Apăsați tasta ACTIVARE (30:2) sau (continuu) ☐

Instructorul oprește cronometrul: _____ secunde (obiectiv: mai puțin de 20 de secunde)

Partea a treia: Atașați centura de fixare

15. Extindeți complet centura de fixare la nivelul cataramelor ☐
16. Așezați perna de sprijin sub gâtul pacientului ☐
17. Conectați cataramele curelelor pernei de sprijin la centurile dispozitivului ☐
18. Strângeți ferm curelele pernei de sprijin ☐
19. Verificați vizual poziția corectă a ventuzei, reglați dacă este necesar ☐