

Uygulamalı eğitim

LUCAS 3 Göğüs Kompresyon Sistemi

Birinci kısım: Sırt plakasını doğru bir şekilde konumlandırın

1. Kardiyak arresti onaylayın ☐
2. Derhal manuel CPR'a başlayın ☐
3. Kasayı açın, otomatik testi başlatmak ve LUCAS cihazını açmak için 1 saniye boyunca AÇMA/KAPAMA düğmesine basın ☐
4. Sırt plakasını kasadan çıkarın ☐
5. Diğer kurtarıcıya "manuel CPR'ı durdur" talimatı verin ☐
6. Sırt plakasını hastanın altına, hastanın koltuk altlarının hemen altına yerleştirin. ☐
7. Diğer kurtarıcıya "manuel CPR'ı devam ettir" talimatı verin ☐

İkinci kısım: Üst kısım eki ve LUCAS kompresyonuna geçiş

8. LUCAS cihazının üst kısmını kasadan kaldırın ve mandal kilitlerinin açık olduğunu kontrol etmek için serbest bırakma halkalarını bir kez çekin ve ardından halkaları bırakın. ☐

Manuel kompresyon durduğunda eğitmen hazırlanır ve zamanlayıcıyı başlatır.

9. Kullanıcıya en yakın taraftan başlayarak üst kısmı sırt plakasına bağlayın. Klik sesini duymanız gerekir. ☐
10. Takıldığından emin olmak için bir kez yukarı çekin ☐
11. Vakum ağzını, göğsün merkezindeki göğüs kemiğinin hemen üstüne konumlandırın. Gerekirse ayarlayın. ☐
12. Vakum ağzını hastanın göğsüne değene kadar iki parmağınızı kullanarak (AYAR modu) aşağı itin ☐
13. Başlangıç konumunu sabitlemek için DURAKLAT düğmesine basın ☐
14. ETKİN (30:2) veya (sürekli) düğmesine basın ☐

Eğitmen zamanlayıcıyı durdurur: _____ saniye (hedef: 20 saniyeden az)

Üçüncü kısım: Sabitleme kemerini takın

15. Sabitleme kemerini tokalara tamamen uzatın ☐
16. Destek minderini hastanın boynuna yerleştirin ☐
17. Destek minderi kemerleri üzerindeki tokaları cihaz kemerine bağlayın ☐
18. Destek minderi kemerlerini iyice sıkın ☐
19. Vakum ağzının uygun pozisyonunu gözünüzle kontrol edin, gerekirse ayarlayın ☐